

Curettes auriculaires courbées avec loupe et lumière Clearlook Variety Pack - BIONIX

Avec jeu d'embout pour différents types d'utilisation

La Clearlook Curette de Bionix® combine un éclairage intégré avec un dispositif de grossissement pour faciliter la visualisation et l'élimination sécurisée et efficace du cérumen du conduit auditif, permettant ainsi aux praticiens de réaliser l'examen plus rapidement.

La loupe et la source lumineuse peuvent être réutilisées plusieurs fois, ce qui contribue à une utilisation plus durable des équipements médicaux.

La curette est courbée pour faciliter la manipulation et la vision.

Caractéristiques :

- Embout variés
- Longueur : 12 cm
- Matière : plastique
- Usage unique
- Éclairage LED
- Idéal pour une vue moins obstruée

Adapté pour :

- Tout type de patient grâce à ses embouts variés

Contenu du set :

- 10 curettes embout Angleloop
- 10 curettes embout Flexloop
- 10 curettes embout Versalooop
- 10 curettes embout Microloop
- 10 curettes embout Infantscoop
- 1 lentille grossissante
- 1 source lumineuse

Conditionnement :

- Boîte de 50 curettes de 5 embouts différents

Mode d'emploi :

Assemblage/démontage :

1. Pour assembler la lighted ear curette, introduisez l'extrémité de la curette dans la source lumineuse en alignant les chevilles qui se trouvent à l'extrémité de la curette sur les rainures à l'intérieur de la source lumineuse.

Appuyez et tournez fermement dans le sens horaire jusqu'à ce que la rotation s'arrête.

Cela aura pour effet de verrouiller la curette en position et d'activer la lumière. Pour fixer la lentille de grossissement, clippez la lentille sur le col de la source lumineuse de sorte que le haut de la lentille soit orienté vers l'embout de la curette auditive.

2. Pour le démontage, appuyez sur la curette et faites-la tourner dans le sens anti-horaire pour la retirer de la source lumineuse.

La lumière s'éteint une fois la curette retirée.

Matériel Médical CE de classe I

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont

Demande d'information: info-produit@robe-medical.com

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

