

ANIOSYME DD1

CE
0459

Détergent
pré-désinfectant
de l'instrumentation



- Formule brevetée
- Premier détergent liquide tri-enzymatique avec propriétés désinfectantes
- Destiné au ramassage de l'instrumentation souillée : absence de contamination croisée
- Référencé dans la Liste positive S.F.H.H.

**PRODUIT
A DILUER**
25 ml → 5L



**0,5%
5 min.**

INDICATIONS

- Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique.
- Nettoyage en bacs à ultra-sons.
- Ramassage de l'instrumentation souillée.

CARACTERISTIQUES


- Premier détergent liquide enzymatique avec propriétés désinfectantes.
- Complexe tri-enzymatique : protéase, lipase, amylase, combiné à des surfactants.
- Efficacité démontrée (PND*) * Pouvoir Nettoyant Dégraissant.
- Formulé sans chlore : pas d'oxydation des matériaux.
- Formulé sans aldéhyde : pas de fixation des protéines.
- Stabilité du bain de trempage : 8 heures (journée opératoire).
- Stabilité enzymatique prouvée.
- pH neutre : compatible avec les alliages d'aluminium.
- Formulé sans chlorure (produit sur base de propionate d'ammonium) : effet anticorrosif vis-à-vis des matériaux.
- Compatible avec les ultra-sons.
- Liquide limpide bleu parfumé.



ANIOSYME DD1

Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation


MODE D'EMPLOI

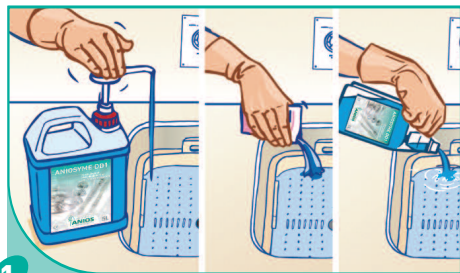

1

Dilution à 0,5 % :

Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.

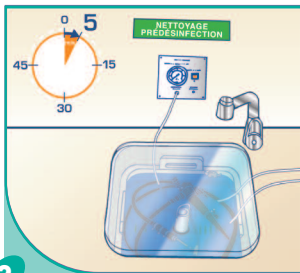


2

Immerger complètement le dispositif médical.

Temps de trempage conseillé : 5 min.

Brosser si nécessaire.


Pour le matériel endoscopique : double nettoyage : 10 et 5 minutes. Ecouvillonner

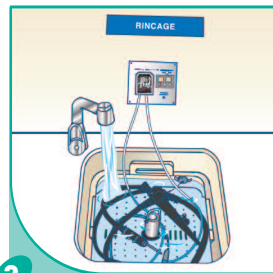

3

Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique).

Pour le matériel endoscopique : l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical.

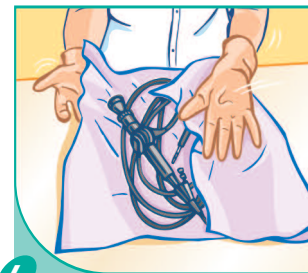

4

Essuyer avec un champ propre. Passer à l'étape suivante (voir protocole interne à l'établissement).

COMPOSITION QUALITATIVE

Propionate d'ammonium quaternaire, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), surfactants, agents stabilisants, séquestrant, parfum, colorant.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
Stockage : de +5°C à + 35°C.

CONDITIONNEMENTS

- 1 Carton de 200 doses de 25 ml.....Réf. 1200.097
- 2 Carton de 12 flacons de 1 litre avec doseur incorporé.....Réf. 1200.095
- 3 Carton de 4 bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 25 ml.....Réf. 1200.036

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040 EN 13727 (conditions de saleté : albumine et érythrocytes) NFT T 72-170 en présence de substances interférentes (conditions de saleté) SARM (EN 13727)	5 minutes
Mycobactéries	Mycobacterium tuberculosis (B.K.)	5 minutes
Levures / Moisissures	EN 1275 (Candida albicans)	5 minutes
Virus	HIV-1, BVDV (virus-modèle de HCV)	5 minutes
	PRV (virus-modèle de HBV)	10 minutes
	Herpès virus	15 minutes

