

Désinfectant ONE SHOT

Air et surface unidose

150 ml

Aérosol percutant à usage unique

Strictement réservé aux professionnels.

Désinfectant air et surfaces - Virucide - Fongicide - Bactéricide

Notamment actif sur hépatite, HIV .

Conforme aux normes : - EN 1276 (bactéricide - Temps de contact : 5 mn à 20°C - EN 1650 fongicide - Temps de contact : 15 mn à 20°C). Hépatite B et HIV (par déduction) : 2 mn.

Le bactéricide fongicide virucide ALTOGERM est un désinfectant d'atmosphère idéal pour assurer une parfaite hygiène. Son utilisation est conseillée aussi bien en usage préventif que durant les périodes de maladies telles que : grippe, rubéole, rougeole, varicelle, coqueluche, scarlatine, pneumonie, rhino pharyngite. Son efficacité bactéricide a été testée selon la norme européenne EN 1276 sur les bactéries, particulièrement résistantes : bacille pyocyanique (*Pseudomonas aeruginosa*), colibacille (*Escherichiacoli*) staphylocoque doré (*staphylococcus hirae*,... Détruit : odeurs putrides, microbes. Son efficacité fongicide a été testée selon la norme EN 1650 sur *Candida albicans* et *Aspergillus niger*. Son efficacité virucide a été testée sur le virus HIV et Hépatite B.

Contact indirect alimentaire. Conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires*.

APPLICATIONS

Désinfection de l'atmosphère : Ecoles, réfectoires, véhicules, ambulances, chambres de malades, cabinets médicaux et dentaires, laboratoires, salles de soins et d'attente, vestiaires, sanitaires, salles de réunion, halls de stockage de linge souillé (maisons de retraite ou autres), ...: après chaque départ du linge, toilettes, greniers, caves, salles de bains, atmosphère humide, cuisine, hôtellerie, médical, collectivités, industrie alimentaire (contact indirect alimentaire*).

Désinfection des chambres froides, réfrigérateurs, cuisines collectives, plans de travail et des transports de denrées alimentaires. L'application doit être suivie d'un rinçage abondant.

Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CARACTERISTIQUES

Boîtier fer blanc diamètre 52 mm/hauteur 105 mm

Volume nominal 210 ml /volume net : 150 ml

Carton de 12 unités.

MODE D'EMPLOI

Enclencher le diffuseur - Sortir de la pièce immédiatement - Le produit se libère automatiquement et en totalité. Bien aérer avant de réintégrer les locaux.

Pour la désinfection de l'atmosphère, un aérosol permet de traiter 50 à 150 m³.

* Si contact direct avec les aliments, rincer ces derniers.