

AUTOCLAVE USB

CLASSE B **HYPERION**



Prise USB



Caractéristiques techniques:

- Stérilisateur à vapeur de classe B avec vide fractionné.
- Préchauffage et séchage ultra rapide pour une durée de stérilisation réduite.
- Choix de 10 cycles dont prion 134°C.
- Jusqu'à 20 000 cycles archivés sans papier sur clé USB
- Imprimante autoclave intégrée.
- Chambre inox grande capacité
- Mode veille pour économie d'énergie
- Fermeture motorisée de la porte assurant une étanchéité parfaite de la chambre de stérilisation
- Ecran LCD rétro éclairé
- Structure et chambre acier inox AISI 304.
- Double réservoir de 4.5 litres: eau propre et eau usée.
- Remplissage et vidange automatique des eaux.
- Cycles de test pré-programmés: bowie & dick, helix, vide
- Equipé d'un porte plateau avec 4 plateaux en aluminium

Conformes aux normes: EN13060/ 93-42CEE/ EN 61010-2-40/ EN 61010-1/ EN61326-1



Autoclave Hyperion 18 litres:

- Dim. extérieures: 505x400x615mm
- Dim. chambre: diam 236x381.5mm
- Poids à vide: 45kg

Autoclave Hyperion 23 litres:

- Dim. extérieures: 505x400x690mm
- Dim. chambre: diam 236x530mm
- Poids à vide: 50kg

Liste des programmes cycles disponibles:

Matériel et instruments <i>Material e Instrumentos</i>	Programme <i>Programa</i>	Phases de vide <i>Fases de vacío</i>	Temps total <i>Tiempo total</i>
Creux délicats et inoxydables (sous sachet) <i>Huecos delicados e inoxidables (empaquetados)</i>	121° creux sous sachet <i>huecos empaquetados</i>	4	28 minutes <i>minutos</i>
Creux inoxydables (sous sachet) <i>Huecos inoxidables (empaquetados)</i>	134° creux sous sachet <i>huecos empaquetados</i>	4	15 minutes <i>minutos</i>
Solides en caoutchouc et solides délicats (sous sachet) <i>Sólidos de goma y sólidos delicados (empaquetados)</i>	121° solides sous sachet <i>sólidos empaquetados</i>	2	28 minutes <i>minutos</i>
Solides inoxydables (sous sachet) <i>Sólidos inoxidables (empaquetados)</i>	134° solides sous sachet <i>sólidos empaquetados</i>	2	15 minutes <i>minutos</i>
Solides et creux inoxydables (sous sachet) <i>Sólidos y huecos inoxidables (empaquetados)</i>	134° prions <i>prion</i>	4	30 minutes <i>minutos</i>
Délicats, creux et petites charges poreuses (sous sachet) <i>Delicados, huecos y pequeños cargamentos porosos (empaquetados)</i>	121° poreux <i>porosos</i>	4	33 minutes <i>minutos</i>
Solides inoxydables, creux et petites charges poreuses (sous sachet) <i>Sólidos inoxidables, huecos y pequeños cargamentos porosos (empaquetados)</i>	134° poreux <i>porosos</i>	4	20 minutes <i>minutos</i>
Solides en caoutchouc et délicats (non sous sachet) <i>Sólidos de goma y delicados (no empaquetados)</i>	121° rapide <i>rápido</i>	2	22 minutes <i>minutos</i>
Solides inoxydables (non sous sachet) <i>Sólidos inoxidables (no empaquetados)</i>	134° rapide <i>rápido</i>	2	9 minutes <i>minutos</i>
Creux en caoutchouc et inoxydables (non sous sachet) <i>Huecos de goma e inoxidables (no empaquetados)</i>	134° creux ouverts <i>huecos abiertos</i>	4	9 minutes <i>minutos</i>
Cycle de test du Bowie & Dick <i>Ciclo test para Bowie & Dick</i>	134° Bowie & Dick <i>Bowie & Dick</i>	4	7,5 minutes <i>minutos</i>
Cycle de test du vide <i>Ciclo test para vacío</i>	<40° test du vide <i>test para vacío</i>	1	15 minutes <i>minutos</i>

ROBÉ MÉDICAL - BP 90061

32 rue de la Joncherie -88202 REMIREMONT CEDEX
Tél 03 29 62 00 25 - Fax 03 29 62 00 00

Email : contact.robe@gmail.com - site : www.robe.fr

SaS au capital de 189 000 € maison fondée en 1887 Siret 775 717 812

robé
+ médical

La qualité au juste prix