

Stetho-STOP[®]

Safe Patient Examination[©] !

MODE D'EMPLOI A LIRE AVANT UTILISATION

Poser le coté adhésif sur le stéthoscope
Veillez au recouvrement complet du pavillon
Usage unique. Jeter entre chaque patient
Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité
à température ambiante de +5 °C à 35 °C. Non stérile.

INSTRUCTION PLEASE READ BEFORE USING

Stick the adhesive face on the stethoscope
Be carefull to cover the whole chestpiece
Single use. Throw away between patient.
Store protected from light and humidity
at room temperature from +5 °C to 35 °C. Non sterile.



STOP
CONTAMINATION
on STETHOSCOPES !



robé
+ médical

Fabriqué par/ made by

32 rue de la joncherie 88200 Remiremont
Tel (33) 3 29 62 00 25 fax (33) 3 29 62 00 00
Email Contact@robe.fr www.robe.fr