



Aiguilles d'acupuncture Tony stériles Coréennes, manche en acier - Non siliconées, sans guide

Une aiguille par blister - Stériles à usage unique - Diam. de 0.18mm à 0.30mm - Boite de 100 aiguilles

Ces aiguilles sont utilisées pour la pratique de l'acupuncture. Leur manche est en acier et le corps de l'aiguille est en acier inoxydable austénitique, sans silicone.

Le manche en acier permet une bonne conductivité thermique ainsi qu'une bonne résistance, il est également idéal pour les débutants et les praticiens rapides.

Tony, une marque Hwato depuis 1862 :

Avec plus d'un siècle d'expérience, Hwato incarne depuis 1862 l'excellence dans la production d'aiguilles d'acupuncture. Les aiguilles Hwato ont remporté de nombreuses récompenses tant en Chine qu'à l'internationale, confirmant leur reconnaissance dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise et perpétuant un savoir-faire ancestral.

Caractéristiques techniques des aiguilles :

- AKW183 - Diam. : 0.18mm - Long. du corps de l'aiguille : 13mm
- AKW215 - Diam. : 0.20mm - Long. du corps de l'aiguille : 15mm
- AKW225 - Diam. : 0.25mm - Long. du corps de l'aiguille : 25mm
- AKW240 - Diam. : 0.25mm - Long. du corps de l'aiguille : 40mm
- AKW330 - Diam. : 0.30mm - Long. du corps de l'aiguille : 30mm
- AKW340 - Diam. : 0.30mm - Long. du corps de l'aiguille : 40mm

Précautions et avertissements :

- Doivent être utilisées par des praticiens qualifiés en acupuncture,
- Aiguilles stérilisées par du gaz d'oxyde d'éthylène - À usage unique,
- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée ou si l'emballage intérieur a été ouvert,
- Utiliser précautionneusement dans le cas de l'acupuncture avec stimulation électrique,
- Détruire après usage.

Contre indications :

- Éviter de poncturer sur le cerveau, la moëlle, l'organe interne et la zone des vaisseaux sanguins,
- Éviter de poncturer les zones où le vaisseau sanguin coule, ou avec prudence. Poncturer sur les articulations principales avec prudence.
- Éviter de poncturer sur les 24 points Chungting, le long du méridien. Évitez de poncturer l'abdomen inférieur et supérieur, la région lombo-sacrée et les trois points Baihui pendant la grossesse, évitez également Shimen pour les femmes, et Mingmen pour les patients de moins de 3 ans.

Robé Médical 26 Rue de la République 82000 Montauban France
Demande d'informations : info@robe-medical.com