

### Curettes auriculaires courbées avec loupe et lumière Clearlook Angleloop - Boîte de 50 - BIONIX

Embout rond de 4 mm de diamètre, conçu pour extraire les bouchons de cérumen tenaces chez l'adulte

La Clearlook Curette de Bionix® Angleloop combine un éclairage intégré avec un dispositif de grossissement pour faciliter la visualisation et l'élimination sécurisée et efficace du cérumen du conduit auditif, permettant ainsi aux praticiens de réaliser l'examen plus rapidement.

La loupe et la source lumineuse peuvent être réutilisées plusieurs fois, ce qui contribue à une utilisation plus durable des équipements médicaux.

La curette est courbée pour faciliter la manipulation et la vision.

#### Caractéristiques :

- Embout de 4 mm de large
- Embout rond
- Longueur : 12 cm
- Matière : plastique
- Usage unique
- Éclairage LED
- Idéal pour une vue moins obstruée

#### Adapté pour :

- Le cérumen plus dur chez les adultes

#### Contenu du set :

- 50 curettes de taille identique
- 1 lentille grossissante
- 1 source lumineuse

#### Conditionnement :

- Boîte de 50 curettes

#### Mode d'emploi :

Assemblage/démontage :

1. Pour assembler la lighted ear curette, introduisez l'extrémité de la curette dans la source lumineuse en alignant les chevilles qui se trouvent à l'extrémité de la curette sur les rainures à l'intérieur de la source lumineuse.

Appuyez et tournez fermement dans le sens horaire jusqu'à ce que la rotation s'arrête.

Cela aura pour effet de verrouiller la curette en position et d'activer la lumière. Pour fixer la lentille de grossissement, clippez la lentille sur le col de la source lumineuse de sorte que le haut de la lentille soit orienté vers l'embout de la curette auditive.

2. Pour le démontage, appuyez sur la curette et faites-la tourner dans le sens anti-horaire pour la retirer de la source lumineuse.

La lumière s'éteint une fois la curette retirée.

Matériel Médical CE de classe I

