



### Désinfectant par immersion Dentasept Ultra - Anios - Bidon de 5L

Désinfectant de haut niveau des instruments et des dispositifs médicaux.

Ce désinfectant de haut niveau, destiné à l'instrumentation et aux dispositifs médicaux, s'utilise par immersion. Grâce à son pH neutre, il est compatible avec tous types de matériaux.

- Produit prêt à l'emploi
- pH neutre qui permet une compatibilité avec tous les types de matériaux
- Activité bactéricide, fongicide et virucide : 10 min.
- Activité sporicide (désinfection de haut niveau) : 60 min.
- Solution utilisable pendant 30 jours

#### Mode d'emploi :

Solution prête à l'emploi pour usage professionnel.

- Tremper les instruments préalablement nettoyés pendant 10 minutes pour les bactéries, virus et champignons, et durant 1 heure pour les spores.
- Recouvrir le bain de trempage.
- Rincer à l'eau stérile ou filtrée à 0.2µm.

**Conservation maximale du bain de trempage :** 30 jours

#### Composition :

Solution de glutaraldéhyde (2%) tamponnée à pH 6, en présence d'un catalyseur d'effet de surface, colorant et excipients.

Dispositif Médical CE.

Fabriqué en France.

Certification EcoVadis.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.