



### Electrodes ECG prégélifiées à languette - Paquet de 100 électrodes

Electrodes prégélifiées à usage unique, destinées aux électrocardiogrammes.

Ces électrodes prégélifiées, à usage unique, sont à appliquer à la surface du corps du patient, pour transmettre le signal cardiaque vers un ECG (électrocardiogramme).

- Électrodes ECG prégélifiées
- Paquet de 100 unités
- Usage unique
- Sans latex
- Pour ECG de 30 minutes maximum
- Peut être utilisées autour d'un environnement de résonance magnétique (marquage MR)

Attention : le marquage "MR" ne s'applique qu'aux électrodes et non aux moniteurs, câbles ou fils conducteurs qui peuvent être attachés à l'électrode.

#### Instructions :

- Nettoyer la peau du patient
- Prendre le nombre d'électrodes pour l'ECG
- Placer les électrodes sur le corps du patient
- Connecter les clips aux électrodes
- Enregistrer l'électrocardiogramme (30 minutes maximum)
- Déconnecter les clips
- Jeter les électrodes

#### Précautions :

- Ne pas stocker dans un endroit chaud
- Usage unique. Utiliser des électrodes différentes pour chaque patient pour éviter les infections croisées
- Nettoyer la peau du patient, couper poils/cheveux aux endroits prévus pour les électrodes