



### Garrot d'entraînement Sof® Tourniquet - TacMed Solutions

Garrot tourniquet à application rapide et fluide, à une ou deux mains.  
Uniquement pour l'entraînement

Garrot d'entraînement utilisé pour se former à stopper une hémorragie dans des conditions d'urgence préhospitalière.

Ce garrot, de marque de renommée internationale **TacMed Solutions**, est plus solide, plus léger et plus facile à utiliser.

#### Uniquement pour l'entraînement

- Se glisse facilement sur un bras ou une jambe
- Se déclipse au niveau de la boucle pour s'adapter aux zones difficiles d'accès
- Conçu par un médecin des forces spéciales
- Garrot favori des milliers d'élite

#### **Caractéristiques spécifiques aux garrots SOF® :**

- Bande de compression performante :

La sangle maximise la compression pendant le processus d'application. Avec une véritable largeur de 3,80 cm, la sangle glisse à travers la boucle robuste pour un fonctionnement rapide et sans accroc et minimise la perte de pression au fil du temps après l'application.

- Indicateur de mou :

Cousu dans la bande de compression, sous le guindeau, cet indicateur en forme de triangle rouge offre une confirmation visuelle que vous avez retiré tout excès de mou de la bande. Il s'agit d'une étape critique pour une application correcte du garrot.

- Boucle robuste :

Conçue pour éliminer l'excès de mou en un seul mouvement fluide. La forme de la boucle stabilise la bande de compression à n'importe quel angle d'engagement.

#### **Dimensions produit emballé :**

12,7 x 5,08 x 2,54

#### **Coloris :**

- Bleu (coloris dédié au matériel d'entraînement)