

## FICHE TECHNIQUE



### **Garrot militaire - Tourniquet tactique - Coloris Noir - 3.9 x 95 cm - ROBEMED**

Garrot militaire pour hémorragie du bras ou de la jambe. Utilisable à une ou deux mains

Garrot militaire tourniquet tactique pour l'hémorragie vasculaire sur des membres blessés, les premiers soins d'urgence sur champ de bataille et également dans le cadre de traitement d'urgence préhospitalier.

- Garrot à usage unique
- Velcro pour ajustement du serrage
- Boucle dentelée pour serrer et desserrer la sangle
- Étiquette pour écrire l'heure de pose du dispositif
- Tige du guideau

#### **Dimensions :**

Larguer : 38 mm (tolérance  $\pm 2$ )

Longueur : 950 mm (tolérance  $\pm 10$ )

#### **Procédure si saignement du bras, à une main :**

- 1/ Déballez le garrot, l'ouvrir en déscrachant le velcro, et l'appliquer en amont de la blessure ou le plus haut possible sur le bras si la position de la blessure exacte n'est pas identifiable.
- 2/ Serrez la sangle et refermez grâce au velcro en la retournant sur elle-même.
- 3/ Ne pas placer la tige contre le corps.
- 4/ Tournez la tige jusqu'à ce que le saignement cesse.
- 5/ Fixez la tige dans la fente, et verrouillez.
- 6/ Fixez la sangle par-dessus la tige. Pour les membres de petits diamètres, continuez à enrouler fermement la sangle par-dessus la tige.
- 7/ Sécurisez l'ensemble en fixant la languette « TIME ». Indiquez l'heure d'application.

#### **Procédure si saignement de la jambe, à deux mains :**

- 1/ Pour enfiler le garrot autour de la jambe, ouvrez-le complètement, passez-le autour de la jambe, puis insérez la sangle dans la boucle par le dessous.
- 2/ Serrez la sangle et refermez grâce au velcro en la retournant sur elle-même.
- 3/ Tournez la tige jusqu'à ce que le saignement cesse.
- 4/ Fixez la tige dans la fente, et verrouillez.
- 5/ Fixez la sangle par-dessus la tige. Pour les membres de petits diamètres, continuez à coller fermement la sangle par-dessus la tige.
- 6/ Sécurisez l'ensemble en fixant la languette « TIME ». Indiquez l'heure d'application.

#### **Précautions :**

- 1/ Ce garrot est à usage unique
- 2/ Ce garrot doit être utilisé par des professionnels de santé entraînés.
- 3/ Lire les instructions avant utilisation.
- 4/ Exigences en matière d'élimination des déchets médicaux : conformément à la réglementation locale.

#### **Stockage :**

Si les conditions de stockage sont respectées, la durée de validité est de 5 ans. Stockez à une température de 5-38°C, et une humidité relative < 80%. Ne pas

exposer au gaz corrosif et gardez dans un endroit ventilé.

Livré avec notice en français et anglais.

Matériel médical CE.