



Lancettes de sécurité auto-rétractables 21G - Lecture de cholestérol - Mission - Boîte de 25

Permet le prélèvement de sang sûr et pratique, sans utiliser de stylo autopiqueur.

Lancettes de sécurité prêtes à l'emploi. Dispositif de prélèvement de sang à usage personnel.

Les lancettes de sécurité sont utilisées pour l'échantillonnage de sang capillaire.

L'utilisation de lancettes permet de réduire les blessures par aiguilles et également les infections.

- Dispositif à usage unique
- Utilisation individuelle et professionnelle
- Dispositif stérile
- Aiguille très fine (21G, 2.8mm)
- Activation par pression

Conditionnement :

boite de 25 lancettes de sécurité

Dimensions :

3.9cm x 1.8cm x 0.8cm

Aiguilles :

21G - 2.8mm

Mode d'emploi :

- 1/ Tourner et retirer délicatement la languette de protection.
- 2/ Après avoir lavé les mains avec du savon et de l'eau chaude, désinfecter le site de prélèvement avec un antiseptique.
- 3/ Appuyer légèrement la lancette contre le site de prélèvement pour inciser la peau. Un clic se fait entendre : cela indique que le dispositif de sécurité de l'appareil a été activé.
- 4/ Jeter la lancette dans un collecteur d'aiguilles prévu à cet effet.
- 5/ Masser la base du doigt pour pouvoir collecter la quantité de sang souhaitée.

Conseil : il est conseillé de piquer sur le côté du droit du doigt (il y a plus de vaisseaux sanguins à cet endroit)

Matériel médical CE