

## FICHE TECHNIQUE

### Lunette à oxygène pédiatrique avec tubulure Teleflex

Lunette oxygène extra souple adaptées aux enfants avec embout nasal fin.

Ces lunettes à oxygène permettent de transmettre l'oxygène produit par un extracteur d'oxygène.

Elles délivrent de l'oxygène par le biais de deux embouts nasaux.

Etudiées pour être confortables, elles sont équipées d'une languette flexible qui permet de stabiliser la lunette sur la lèvre supérieure du patient.

La courbure systématique des embouts s'adapte à l'anatomie du patient.

Pratique, elles permettent à l'utilisateur de conserver son autonomie, ce dernier peut ainsi manger, boire, parler et prendre son traitement sans avoir besoin de les enlever.

Ce dispositif non stérile est adapté aux enfants.

- Embout droit.
- Tubulure 2.1 m.
- Extra souple.
- Connexion standard.

#### **Conseils d'utilisation:**

- Placer les embouts face aux narines.
- Faire passer les 2 tubulures autour des 2 oreilles, positionner les embouts dans chaque narine.
- Passer la tubulure sous le menton et remonter l'anneau pour fixer la lunette.

Livré sous emballage étanche individuel.

Vendu par lot de 5 lunettes à oxygène.

Matériel médical CE.

