



### Manchons antidérapants pour poignées de déambulateur - MyRollerSleeve de My Add On®

Manchons souples antidérapants. Absorbent les chocs, diminuent les douleurs aux mains et offrent une meilleure adhérence.

Ces manchons pour poignées MyRollerSleeve sont adaptables sur les poignées de déambulateurs ou de fauteuils roulants.

Chaque manchon est accompagné d'un patch en gel qui permet de répartir les points de pression des mains. La matière absorbe les chocs pour protéger les mains et poignées lors des déplacements.

- Plus de mains douloureuses
- Meilleure adhérence
- Diminue la sudation des mains
- Convient à tout type de poignée de déambulateur
- Facile à nettoyer
- Démontage sans traces

Les manchons MyRollerSleeve sont livrés par 2, avec deux gels pads à positionner directement sur les poignées avant d'enfiler les manchons.

Un aimant décoratif (design aléatoire) est également livré avec les MyRollerSleeve.

**Coloris :** Noir

#### Comment mettre en place les manchons MyRollerSleeve ?

Pour commencer, bien serrez les freins et s'asseoir sur le déambulateur.

- 1/ S'assurer que la poignée est propre et sèche
- 2/ Retirer le film des patchs gels
- 3/ Positionner les patchs gel sur chaque poignée. Attention, il y a un sens (voir photo)
- 4/ S'assurer que le MyRollerSleeve est enroulée le plus serré possible (aimant vers l'extérieur)
- 5/ Placer le manchon sur le bout de la poignée et le dérouler complètement
- 6/ Pour finir, enfoncer le manchon jusqu'à qu'il soit bien positionné
- 7/ Placer l'aimant décoratif du côté souhaité.

#### IMPORTANT :

Ne convient pas aux personnes ayant un pacemaker  
Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans.