



### Modèle de bras d'injection intraveineuse - 64 cm

Bras d'injection intraveineuse à utiliser comme modèle pour la formation

Ce modèle représente un membre supérieur en plastique avec une veine peu profonde au niveau du coude et de l'avant-bras.

Ce modèle comprend une plaque de support où sont suspendus les flacons de transfusion, les instruments de transfusion sanguine et les instruments de transfusion liquide.

Ce modèle de bras peut démontrer les éléments suivants :

- Phlébotomie veineuse sur le coude et l'avant-bras
- Injection veineuse sur le coude et l'avant-bras
- Transfusion sanguine veineuse sur le coude et l'avant-bras
- Transfusion de liquide veineux sur le coude et l'avant-bras
- Injection musculaire sur le deltoïde sur le côté du membre supérieur

Ce modèle est l'un des modèles éducatifs de base dans les formations de soins infirmiers.

#### Installation :

- Visser l'écrou pour fixer le support au trou préconçu sur la plaque.
- Descendre un des tubes en caoutchouc et insérez-le dans le flacon. L'autre tube en caoutchouc vers le haut et relié à la poche de transfusion par le tube de liaison.
- Accrocher le flacon de transfusion au support, puis le connecter aux instruments de transfusion veineuse.

Il est recommandé d'utiliser du faux sang avec ce produit : [notre référence](#)

**Dimension de l'avant-bras :** 62 cm

Information : ce matériel, et les produits vendus avec, ne sont conçus que pour l'entraînement sur simulateur