



Nettoyant et désinfectant Dentasept 3H Rapid Anios - Flacon de 1L ou Bidon de 5L + pompe

Nettoyage et désinfection de l'instrumentation

La solution concentrée Dentasept 3H Rapid s'utilise pour le nettoyage et la désinfection des instruments. Économique, elle se dilue : 1 litre de solution fournit 50 litres de produit prêt à l'emploi.

- 1 litre de solution concentrée fournit 50 litres de solution prête à l'emploi
- Efficace dès 5 minutes - actif sur virus enveloppés
- Peut être utilisé en bac à ultrasons
- pH : 7 (dilué à 2%)
- Non corrosif et compatible avec une large gamme de matériaux

Mode d'emploi :

- Amorcez la pompe associée avant la première utilisation.
- S'utilise en trempage à la dilution requise, en respectant un temps de contact minimum de 5 min.
- Immerger totalement le dispositif médical.
- Garder le bain de trempage couvert pendant le temps de contact.
- Brosser si présence de souillures apparentes.
- Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau de réseau pour éliminer toute trace de produit et souillure organique.
- Remplacer la solution dès que celle-ci est visiblement souillée et au minimum une fois par jour pour maintenir l'efficacité du produit.

Composition :

Chlorure de didécylidiméthylammonium, digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, parfum, colorant, excipients.

Conditionnement :

Flacon de 1L avec doseur ou bidon de 5L avec pompe

Dispositif médical CE.

Fabriqué en France.

Certification EcoVadis.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Produit corrosif.