



Nettoyeur auriculaire électrique avec système d'irrigation - Ear cleaner Inskam

Nettoyeur auriculaire sur batterie - Qualité professionnelle - Ear cleaner irrigateur Inskam

Le nettoyeur auriculaire électrique est un dispositif conçu pour une irrigation auriculaire efficace et sécurisée. Sans douleurs, ni effets secondaires, il permet de soulager efficacement et en toute sécurité les oreilles bouchées de façon hygiénique grâce à ses embouts jetables. Ces embouts, souples et remplaçables, permettent de minimiser les risques d'infections.

L'appareil possède **4 modes de pulvérisations** permettant ainsi de régler le débit de l'eau.

? 1?? vitesse - Mode normal : Pression d'eau modérée, convenant à la plupart des personnes

? 2? vitesse - Mode doux : Pression d'eau moyenne, nettoyage en profondeur efficace

? 3? vitesse - Mode pulsé : Alternance de flux d'eau fort et faible

? 4? vitesse - Mode fort : Une forte pression d'eau permettant d'éliminer les accumulations de cérumen les plus tenaces

Cet appareil sur batterie permet un temps d'utilisation de 7 heures. Son mode économie d'énergie permet une mise en veille de l'appareil suite à 10 minutes d'inactivités.

Utilisation :

? Utiliser de l'eau tiède à la température du corps (ou 37°C + ou - 2°C) pour éviter tout risque de douleurs

? Fixer un embout auriculaire à usage unique

? Placer la cuvette sous l'oreille pour l'irrigation

? Effectuer des mouvements circulaires doux pour augmenter le nettoyage

? Le blocage est éliminé et l'irrigation de l'oreille est terminée

Conseils :

? Avant la première utilisation, charger le nettoyeur pendant 4 heures

? Il est normal de ressentir une pression, mais pas une douleur

Caractéristiques :

? 4 modes de pulvérisation

? Hygiénique : embouts jetables

? Conception ergonomique

? Fonction économie d'énergie : s'éteint automatique après 10 minutes d'inactivité

Spécifications :

? Capacité de la batterie : 2000 mVA

? Puissance : 1,3W

? Niveaux de pression d'eau : 7 à 24,5 PSI

? Entrée : Type C 5v/1A

? Temps de charge : 4 heures

? Temps de travail : 7 heures

? Bouteille d'eau : 500 ml

? Poids net : 280g

L'emballage contient :

?Système électrique d'irrigation de l'oreille

? Bac de récupération

? Embout à 5 trous

? Embouts jetables x9

? Plaque de protection des projections

? Chiffon

? Câble USB Type C

? Manuels FR/EN

Certifié conforme aux normes européennes :

? CE/RoHS/FCC