

## FICHE TECHNIQUE

### Palette de 10 couleurs de fards crème - Maqpro

Permet maquiller les réalisations des blessures en Latex ou en Plasto-Nat

La palette de 10 couleurs de fards crème aide à mettre en relief les effets de volumes et les raccords avec la peau des plaies.

Cires minérales teintées à l'aide de pigments alimentaires totalement inoffensifs pour la peau.

#### Avantages :

- ils se mélangent facilement entre eux.
- ils ont une excellente réflexion à la lumière.
- ils tiennent parfaitement et résistent à toutes les agressions.

#### Coloris :

- Blanc, Rouge, Jaune, Noir, Chair clair, Chair foncé, Bleu, Rouge sang, Chair foncé, Kaki.

**Mode d'emploi :** Les fards crème s'appliquent au doigt, au pinceau ou à l'éponge.

**Au doigt :** pour les colorations de : plaies, hématomes etc.

- 1 - Positionner l'index sur le majeur, ce qui va vous donner une rigidité pour la coloration de vos réalisations ;
- 2 - Prendre du **fard crème** à l'aide de la pulpe du doigt ;
- 3 - Tapoter par petites touches.

**Au pinceau :** en général on utilise le pinceau pour donner un effet de profondeur à une plaie ;  
Ne pas le mouiller.

**À l'éponge :** pour maquiller les grandes surfaces (ex. : réalisation d'une pâleur).

Les fards crème se conservent plusieurs mois, s'ils sont stockés dans de bonnes conditions, c'est à dire hermétiquement clos, dans un endroit sec à une température entre 5 et 25°.

Fabrication Française.

