

FICHE TECHNIQUE



Pessaires gynécologiques en forme de cube perforé - De 25 à

Dispositif en silicone médical utilisé pour soutenir l'utérus et la paroi vaginale chez les fen

Un pessaire est un dispositif à insérer dans le vagin pour aider à soulager le prolapsus ge de fuites urinaires.

Le pessaire contribue à soulager la douleur vaginale. Il n'est pas invasif et présente peu d'effets secondaires.

Ce pessaire est fabriqué en silicone de qualité médicale et est **conçu pour être utilisé p** Ils peuvent être utilisés en association avec la rééducation du périnée.

Pour en savoir plus, voir la fiche de la Haute Autorité de Santé : Fiche HAS - Pessaire / P

Quelle taille de pessaire choisir ?

Les dimensions des pessaires sont généralement basées sur la mesure de la largeur de un gynécologue, un médecin ou une sage-femme.

Recommandations : La première pose du pessaire doit être effectuée par un profes une sage-femme. Il est important de maintenir une hygiène rigoureuse du pessaire

- Pessaire en forme de cube perforé
- Dispositif médical de classe Ila
- Fabriqué en silicone de qualité médicale
- Matière douce et flexible
- Meilleure durée de vie que le latex
- Se garde plusieurs années
- Différentes tailles pour mieux s'adapter à la morphologie
- Peut être utilisé de manière continue ou intermittente

Le pessaire est prescrit par le gynécologue, le médecin ou la sage-femme en consultation

Il n'est plus pris en charge par l'assurance maladie.

Il existe des pessaires en latex ou silicone. Le silicone est souvent privilégié, car il dure p

Cube perforé : quelle différence avec les autres formes de pessaires ?

La forme en cube permet de mieux répartir la pression et de maintenir les organes dans l La conception perforée du pessaire en forme de cube offre une plus grande tolérance po exercée sur les tissus vaginaux

Plusieurs tailles sont disponibles pour ce modèle : 25mm / 29mm / 33mm / 37mm / 41mm

Combien de temps garder un pessaire ?

Contrairement à un pessaire en latex qui doit se remplacer tous les 6 mois à 1 an, un pes changer tous les 2 à 3 ans. À noter qu'il est important de le remplacer si son aspect a cha

Comment mettre en place un pessaire ?

L'ajustement nécessite généralement un essai de différentes tailles pour déterminer la tai aide précieuse pour sélectionner le pessaire adéquat. Un lubrifiant vaginal peut être néce conseillé d'utiliser un lubrifiant à base d'eau pour ne pas détériorer la qualité du silicone.

Les étapes de mise en place du pessaire :

1) Effectuer un examen pelvien normal avant la pose et l'introduction d'un pessaire. L'exa pliera facilement sur les plus grands trous de drainage pour simplifier l'insertion et le retra toutefois causer de pression ou d'inconfort excessif.

2) Comprimer le pessaire et l'insérer doucement dans le vagin. Une fois que le pessaire a qu'il reprenne sa forme normale.

3) Déplacer doucement le pessaire vers le col de l'utérus pour soutenir le cystocèle (desc est dans la bonne position, le médecin doit pouvoir insérer un doigt entre le bord extérieu de la patiente et réduira le risque de nécrose de pression.

4) Une fois en place, le pessaire ne doit pas se déloger en position debout, assise, accropendant l'une de ces activités de routine.

5) Si la patiente doit s'occuper du pessaire, veiller à lui donner des instructions sur son ne

6) La patiente doit signaler immédiatement toute gêne ou difficulté à uriner ou déféquer.

Comment retirer un pessaire ?

Pour retirer le pessaire, déplacer soigneusement le pessaire vers l'avant en direction de le pessaire et le retirer délicatement.

Comment entretenir un pessaire ?

Après la première pose, le médecin prévoit généralement un contrôle entre le 1er et le 3è

Après cela, si la manipulation est faite par l'utilisatrice, le pessaire peut être nettoyé avec

La durée d'utilisation du pessaire est limitée. Examiner le pessaire pour détecter tout sign

À noter qu'il est normal d'avoir des pertes vaginales plus importantes lors du port d'un pe

Informations et suivi suggéré

Les rapports sexuels peuvent être contre-indiqués lorsque le pessaire utilisé est l'un des

Dans les 24 à 48h heures, s'assurer que la patiente n'est pas allergique au pessaire. Exa une irritation, une pression, une sensibilité ou des pertes vaginales inhabituelles. Détermi personnels.

Planifier les visites de suivi en fonction des besoins de la patiente et conformément à la p

À quelle fréquence porter le pessaire ?

Il peut être porté de façon quotidienne ou de manière épisodique (lors d'activité physique

Dispositif médical IIa conforme à la Directive 93/42/EEC (MDD).

Non stérile

Le pessaire peut être stérilisé par un professionnel de santé, mais même pour une premindiqués précédemment.