

### Poire pour mamelons Latch Assist - Lansinoh

Aide à faire ressortir les mamelons ombiliqués et plats pour que le bébé puisse les saisir plus facilement.

La poire Latch Assist™ de Lansinoh® facilite l'allaitement en faisant ressortir en douceur les mamelons ombiliqués ou plats. Avec cette solution, bébé peut le saisir plus facilement et se nourrir à la fois correctement et confortablement.

Grâce à la poire Latch Assist™ de Lansinoh®, les mamans peuvent faire temporairement et délicatement ressortir leur mamelon pour que bébé puisse prendre le mamelon et l'aréole et bien attraper le sein, c'est la première étape d'une bonne tétée.

Simple, efficace et facile à utiliser d'une seule main, le tire téton Latch Assist™ de Lansinoh® est la solution idéale à un désagrément qui peut préoccuper les jeunes mamans.

La poire est livrée avec une petite boîte de rangement pour un transport facile et une hygiène optimisée.

#### **Caractéristiques du produit :**

- Fait délicatement ressortir les mamelons plats ou ombiliqués avant la tétée
- Simple et efficace
- Facile à utiliser – la poire peut être utilisée rapidement et facilement d'une seule main
- La poire Latch Assist™ de Lansinoh® est livrée avec une petite boîte de rangement pour un transport facile et une hygiène optimisée
- Pour un confort optimal, la poire pour mamelons Latch Assist™ est livrée avec 2 embouts de tailles différentes (19mm et 24mm) pour plus d'efficacité
- Sans BPA ni BPS

#### **Utilisation :**

Ce modèle de tire mamelon est composé d'une poire et d'un embout.

Sa prise en main se fait donc très rapidement. L'embout va recouvrir uniquement le bout du mamelon plat, qui après quelques légères pressions sortira, ce qui permettra à bébé de téter très facilement.

Une certaine hygiène doit être respectée lors de l'utilisation de ce tire téton. Il est important de se laver les mains, de bien laver le tire mamelon plat avant l'allaitement, à l'eau chaude, et de le laisser sécher naturellement.

Une fois la tétée terminée, le lait restant dans le tire téton sera jeté, et l'appareil sera de nouveau nettoyé.

Ce modèle est petit, ce qui le rend très pratique, il peut être transporté simplement et utilisé où que vous soyez.

