



### Pressothérapie - Bottes de compression sans fil pour jambes - ZeniXx

Pour une amélioration de la circulation sanguine. 3 modes de massage, 3 niveaux d'intensité

Ces bottes de pressothérapie fonctionnent en se gonflant et en comprimant les mollets et les pieds. Les muscles ont l'impression d'être massés par les mains.

Sans fil pour une utilisation plus libre.

- Autonomie moyenne de 4 heures (selon le mode et l'intensité)
- 3 modes de massages
- 3 niveaux d'intensité
- Non chauffant
- Massage des mollets et des pieds
- Fonction d'arrêt automatique après 20 minutes
- Contrôle intégré aux bottes
- Temps de charge entre 3 et 4 heures

#### Compris avec les bottes :

- 1 x Adaptateur secteur pour la charge/DC5V 2A
- 1 x Sac de rangement

#### Utilisation :

- S'assurer que chaque botte soit correctement placée sur le bon pied.
  - Vérifier et ajuster la position et le serrage, sans trop serrer.
  - Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour lancer l'appareil.
- Il commencera par le mode 1 et la force 1 (la plus basse) par défaut.
- Appuyer sur le bouton « Mode » pour changer et profiter des différents modes de massage.
  - Appuyer sur le bouton d'intensité pour sélectionner l'intensité.
  - Appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.