

## FICHE TECHNIQUE

### Set d'essai de 10 pessaires de Gellhorn - Silicone médicale

Set de 10 tailles de pessaires de Gellhorn permettant de choisir la taille adaptée du pessaire.

Le kit d'essai pour pessaire est conçu pour permettre aux professionnels de santé de tester avant de le prescrire. Stérilisable et autoclavable à 134°.

*Le kit d'essai pour pessaire n'est pas conçu pour être utilisé par la patiente.*

Pour en savoir plus, consulter la fiche de la Haute Autorité de Santé : [Fiche HAS](#)

- Pessaire d'essai de Gellhorn
- Dispositif médical de classe IIa
- Fabriqué en silicone de qualité médicale
- Matière douce et flexible
- Permet de déterminer la taille et le type de pessaire idéal pour la patiente
- Peut être utilisé avec un lubrifiant vaginal à base d'eau
- Stérilisable

#### Nettoyage, désinfection et stérilisation :

Les pessaires doivent faire l'objet d'une désinfection et d'un nettoyage entre chaque patiente.

##### Phase nettoyage/désinfection :

Utilisation d'un nettoyant désinfectant enzymatique avec concentration et durée de temps recommandés dans un bac à ultrasons.

##### Avec laveur désinfecteur :

Norme EN ISO 15883 : A0 = 3000 (5 min. à 90°C).

##### Stérilisation avec autoclave :

Autoclave de classe B : Utiliser un cycle 134°C pendant 18 minutes.

#### Vérification :

Chaque pessaire doit être contrôlé périodiquement pour vérifier qu'il ne présente pas de fissures, de rayures profondes ou de déformations. Chaque pessaire doit être nettoyé et subir une désinfection ou une stérilisation adéquate.

Un pessaire présentant des fissures ou des rayures profondes doit être jeté et remplacé immédiatement.

Le kit d'essai pour pessaire est validé pour 150 cycles de nettoyage et de stérilisation.

#### Procédure pour le choix de la taille et de la forme :

1. Effectuer un examen pelvien normal avant la pose et l'introduction d'un pessaire.
2. Comprimer le pessaire et insérez-le doucement dans l'introitus. Une fois que le pessaire est en place, il doit reprendre sa forme normale.
3. Déplacer doucement le pessaire vers le col de l'utérus. Lorsqu'il est dans la bonne position, il doit être maintenu en place par l'espace entre le bord extérieur du pessaire et la paroi vaginale. Cet espacement assure le confort.



4. Une fois en place, le pessaire ne doit pas se déloger lorsque la patiente se tient debout, s'assoit, s'accroupit ou se penche. Il ne doit pas être inconfortable pour la patiente.

Dispositif médical de classe IIa CE conforme à la Directive 93/42/EEC (MDD).