

## FICHE TECHNIQUE

### Set d'essai de 10 pessaires en forme d'anneau - Silicone médical - 45 à 102 mm - Robemed

Set de 10 tailles d'anneaux permettant de choisir la taille adaptée du pessaire

Le kit d'essai pour pessaire est conçu pour permettre aux professionnels de santé de déterminer la taille et le type de pessaire qui conviennent à la patiente avant de le prescrire.

*Le kit d'essai pour pessaire n'est pas conçu pour être utilisé par la patiente.*

Le coloris des produits peut varier entre Rose ou Blanc.

Pour en savoir plus, consulter la fiche de la Haute Autorité de Santé : [Fiche HAS - Pessaire / Prolapsus](#)

- Pessaire d'essai en forme d'anneau
- Dispositif médical de classe IIa
- Fabriqué en silicone de qualité médicale
- Matière douce et flexible
- Permet de déterminer la taille et le type de pessaire idéal pour la patiente
- Peut être utilisé avec un lubrifiant vaginal
- Stérilisable

#### Désinfection et stérilisation :

Les pessaires doivent faire l'objet d'une désinfection et d'un nettoyage entre chaque patient. Les recommandations fabricant sont les suivantes:

#### Phase nettoyage/désinfection :

Utilisation d'un nettoyant désinfectant enzymatique avec concentration et durée de trempage recommandée pour ce type de dispositif. Utilisation possible d'un bac à ultrasons.

#### Avec laveur désinfecteur :

Norme EN 15883 : A0 = 3000 (5 min. at 90 C).

#### Stérilisation avec autoclave :

Autoclave de classe B : Utiliser cycle 134° pendant 18 minutes.

#### Vérification :

Chaque pessaire doit être contrôlé périodiquement pour vérifier qu'il ne présente pas de fissures ou de rayures profondes qui pourraient rendre impossible un nettoyage et une désinfection ou une stérilisation adéquate.

Un pessaire présentant des fissures ou des rayures profondes doit être jeté et remplacé immédiatement.

Le kit d'essai pour pessaire est validé pour 150 cycles de nettoyage et de stérilisation.

#### Procédure pour le choix de la taille et de la forme :



1. Effectuer un examen pelvien normal avant la pose et l'introduction d'un pessaire.
2. Comprimer le pessaire et insérez-le doucement dans l'introitus. Une fois que le pessaire a traversé l'introitus, relâchez le pessaire comprimé pour qu'il reprenne sa forme normale.
3. Déplacer doucement le pessaire vers le col de l'utérus. Lorsqu'il est dans la bonne position, le professionnel de santé doit pouvoir insérer un doigt d'examen entre le bord extérieur du pessaire et la paroi vaginale. Cet espacement assure le confort de la patiente.
4. Une fois en place, le pessaire ne doit pas se déloger lorsque la patiente se tient debout, s'assoit, s'accroupit ou se penche. Il ne doit pas être inconfortable pour la patiente.

Dispositif médical de classe IIa CE conforme à la Directive 93/42/EEC (MDD).