

## FICHE TECHNIQUE

### Set d'essai de 8 pessaires en forme de cube - Silicone médical

Set de 8 tailles de pessaires en forme de cube permettant de choisir la taille adaptée à la patiente.

Le kit d'essai pour pessaire est conçu pour permettre aux professionnels de santé de tester la taille avant de le prescrire.

*Le kit d'essai pour pessaire n'est pas conçu pour être utilisé par la patiente.*

Pour en savoir plus, consulter la fiche de la Haute Autorité de Santé : [Fiche HAS - Pessaire](#)

- Pessaire d'essai en forme de cube
- Dispositif médical de classe IIa
- Fabriqué en silicone de qualité médicale
- Matière douce et flexible
- Permet de déterminer la taille et le type de pessaire idéal pour la patiente
- Peut être utilisé avec un lubrifiant vaginal
- Stérilisable

#### Désinfection et stérilisation :

Les pessaires doivent faire l'objet d'une désinfection et d'un nettoyage entre chaque patiente.

#### Phase nettoyage/désinfection :

Utilisation d'un nettoyant désinfectant enzymatique avec concentration et durée de temps recommandés dans un bac à ultrasons.

#### Avec laveuse désinfecteur :

Norme EN 15883 : A0 = 3000 (5 min. at 90 C).

#### Stérilisation avec autoclave :

Autoclave de classe B : Utiliser cycle 134° pendant 18 minutes.

#### Vérification :

Chaque pessaire doit être contrôlé périodiquement pour vérifier qu'il ne présente pas de fissures, de rayures ou de déformations. Une vérification, un nettoyage et une désinfection ou une stérilisation adéquate.

Un pessaire présentant des fissures ou des rayures profondes doit être jeté et remplacé immédiatement.

Le kit d'essai pour pessaire est validé pour 150 cycles de nettoyage et de stérilisation.

#### Procédure pour le choix de la taille et de la forme :

1. Effectuer un examen pelvien normal avant la pose et l'introduction d'un pessaire.
2. Comprimer le pessaire et insérez-le doucement dans l'introitus. Une fois que le pessaire est introduit, il reprendra sa forme normale.
3. Déplacer doucement le pessaire vers le col de l'utérus. Lorsqu'il est dans la bonne position, il y aura un espace entre le bord extérieur du pessaire et la paroi vaginale. Cet espacement assure le confort.



4. Une fois en place, le pessaire ne doit pas se déloger lorsque la patiente se tient debout, s'assoit, s'accroupit ou se penche. Il ne doit pas être inconfortable pour la patiente.

Dispositif médical de classe IIa CE conforme à la Directive 93/42/EEC (MDD).