



### Solution pour lentilles de contact souples - 100 ml et 400 ml

Nettoyante et hydratante. Pour usage quotidien.

Solution stérile, isotonique et tamponnée pour un entretien quotidien de vos lentilles. Pour nettoyer, éliminer les dépôts de protéines, rincer et décontaminer les lentilles. Solution hydratante pour conserver la souplesse de vos lentilles. Composition proche de celles des larmes.

**Avant toute opération, ayez les deux mains (paumes et doigts inclus) parfaitement propres et sèches.**

#### Nettoyage des lentilles :

- Une fois enlevée, poser la lentille dans la paume de la main.
- Rincer chaque face de la lentille avec la solution.
- Pour un nettoyage complet et recommandé une fois par semaine, frotter délicatement la lentille avec le bout de l'index pendant 10 secondes et répétez cette opération sur l'autre face de la lentille. Ensuite, rincer à nouveau la lentille.
- Remplir l'étui de solution et placer la lentille dans le compartiment approprié.
- Veuillez à ce que les lentilles soient totalement recouvertes de liquide. Fermer ensuite correctement.
- Répéter les mêmes opérations avec l'autre lentille.
- Laisser les lentilles au minimum 4 heures dans le liquide avant de les utiliser à nouveau.

Composition : HEC 0,14g/L, EDTA 0,1g/L, PHMB 0,0015 g/L, Sodium Hyaluronate : 0,15 g/L, Buffered isotonic solution.

#### Recommandations :

- Ne pas utiliser la solution pour lentilles si vous êtes allergique à l'un des composants.
- À utiliser 3 mois après ouverture.
- Conserver à température ambiante.
- Ne pas dépasser la date indiquée sur le flacon.

#### Conditionnement disponible :

- Flacon de 100 ml.
- Flacon de 400 ml.

Disponible également en [pack économique](#) (3 flacons de 360 ml) et en [format voyage](#) (2 flacons de 50 ml).

Livré avec un étui à lentille et notice d'utilisation.

Matériel Médical CE.