

Sonde périnéale connectée Perifit - Disponible en Rose et Verte

Décuplez son bien-être intime avec la sonde connectée Perifit

Fini les entraînements de rééducation du périnée ennuyeux. La sonde périnéale connectée créée par Perifit permet d'entraîner son périnée tout en jouant à des jeux sur son smartphone développés par des professionnels de la santé.

Conçue spécialement pour les femmes qui souffrent de troubles du plancher pelvien tels que l'incontinence ou le prolapsus, cette sonde permet de visualiser ses contractions en temps réel sur son écran et de suivre ses progrès au fil du temps.

Grâce à son système d'analyse 5D, la sonde Perifit mesure avec précision la force, l'endurance, la précision, le relâchement et l'assiduité des contractions musculaires permettant de cibler ses points d'amélioration.

La sonde vaginale Perifit s'adapte à toutes les anatomies grâce à son diamètre de seulement 26 mm.

Elle possède 7 programmes d'entraînement pour répondre aux différents besoins :

1. Prévention
2. Amélioration du bien-être intime
3. Traitement de l'incontinence à l'effort
4. Incontinence urgente
5. Prévention des troubles du périnée
6. Rééducation du périnée après l'accouchement
7. Traitement d'un prolapsus.

Comment utiliser la sonde Perifit ?

1. Nettoyer la peau autour de l'anus ainsi que la zone génitale
2. Nettoyer la sonde avec de l'eau et du savon
3. Allumer la sonde en appuyant sur le bouton On/Off
4. Insérer la sonde dans son vagin (les deux "oeufs" doivent être complètement insérés)
5. Sur le smartphone, activer le bluetooth et lancer l'application

Dispositif médical CE de classe I conforme au Règlement 2017/745 (MDR).

Logiciel de classe A d'après la certification des logiciels selon la norme IEC 62304.

