



# EziDrops®

## Instructions:

1. Lavez l'applicateur EziDrops avant chaque utilisation.
2. Retournez EziDrops et placez la buse du flacon dans le haut de l'applicateur.
3. Soulevez maintenant le flacon et l'applicateur sur l'œil tout en inclinant la tête vers l'arrière, en regardant le plafond.
4. Une fois que votre tête est aussi loin en arrière et que EziDrops est aussi plat que possible, pressez le flacon pour libérer une goutte.
5. Essuyez tout excès de liquide avec un mouchoir en papier.

Démonstrations vidéo sur [www.EziDrops.com](http://www.EziDrops.com)



ROUGE



Manufactured by:

EziDrops Ltd (UK)  
[www.EziDrops.com](http://www.EziDrops.com)  
WD25 0JL

PATENT PENDING